

Manchon de compression Pulse Road 2 - Informations d'utilisation



SIGVARIS ZI Sud d'Andrézieux rue B Thimonnier 42170 St-Just-St-Rambert France

Manchons de compression à porter pendant l'activité physique.

Le manchon Pulse Road 2 contribue au maintien et à la protection des muscles pendant l'effort**.

** Réduction de l'amplitude du ballonnement des masses musculaires pendant la course à pied. Travaux effectués en 2011 sur 15 personnes sportives par le laboratoire universitaire de Bourgogne, spécialisé en sciences du sport et mouvement.

Indications : Le manchon PULSE Road 2 exerce une compression dégressive qui contribue au maintien musculaire du mollet pendant la pratique sportive.

Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, phlegmatia coerulea dolens, thrombose septique, intolérance au produit.

Précautions d'emploi : En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. Lavez le produit avant la première utilisation. En cas de douleur ou d'inconfort, retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. N'utilisez pas le produit sur une peau lésée. Pour garantir son efficacité, le manchon doit être porté pendant la pratique sportive et doit être correctement positionné sur le mollet. Suivez les conseils d'utilisation et d'entretien indiqués sur cette notice.

Conseils d'entretien :

- Laver à la main ou en machine (limiter l'essorage, éviter toute torsion du manchon), programme "textiles délicats" à 30°C, avec un produit de lavage adapté et sans assouplissant.
- Sécher à plat de préférence, loin de toute source de chaleur.
- Laver les manchons avant chaque usage, ils retrouveront leur niveau de compression initial sans être abîmés.

Composition : 81% Polyamide - 19% Elasthanne

Conseils d'enfilage :

Attrapez le produit en positionnant vos pouces au niveau du revers supérieur. Enfilez d'abord le pied puis déroulez le produit en un seul mouvement jusqu'en dessous du genou (3 cm sous la rotule). Veillez à bien répartir la matière sur la jambe.



Les produits SIGVARIS SPORTS sont des dispositifs médicaux (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils ne peuvent se substituer à des bas médicaux de compression. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Produit fabriqué sous Système de Management de la Qualité certifié AFAQ ISO 9001.

05/2021 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

Date de publication : Avril 2022. Version 1.