

Chaussette de compression Recovery 2 - Informations d'utilisation



SIGVARIS ZI Sud d'Andrézieux rue B Thimonnier 42170 St-Just-St-Rambert France

Chaussettes de compression pour la récupération.

Les chaussettes Recovery 2 contribuent diminuer la fatigue musculaire et à accélérer la récupération*

* Étude et enquête menées par le CREPS de Strasbourg en mai 2010, pour prouver scientifiquement le mode d'action de la chaussette RECOVERY sur la récupération sportive.

Indications : La chaussette de récupération Recovery 2 exerce une compression dégressive qui contribue à diminuer la fatigue musculaire et à accélérer la récupération après l'effort.

Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, phlegmatia coerulea dolens, thrombose septique, intolérance au produit.

Précautions d'emploi : En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. Lavez le produit avant la première utilisation. En cas de douleur ou d'inconfort, retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. N'utilisez pas le produit sur une peau lésée. Pour garantir son efficacité, la chaussette doit être enfilée rapidement après l'effort et portée au minimum 2 heures. Suivez les conseils d'utilisation et d'entretien indiqués sur cette notice.

Conseils d'entretien :

- Laver à la main ou en machine (limiter l'essorage, éviter toute torsion du produit), programme "textiles délicats" à 30°C, avec un produit de lavage adapté et sans assouplissant.
- Sécher à plat de préférence, loin de toute source de chaleur.
- Laver les produits avant chaque usage, ils retrouveront leur niveau de compression initial sans être abîmés.

Composition : 64% Polyamide - 22% Polyester - 14% Elasthane

Conseils d'enfilage : Introduisez votre main dans la chaussette et retournez-la jusqu'à hauteur du talon. Introduisez votre pied et positionnez correctement votre talon. Déroulez le produit sur la jambe en veillant à bien répartir la matière.



Les produits SIGVARIS SPORTS sont des dispositifs médicaux (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils ne peuvent se substituer à des bas médicaux de compression. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Produit fabriqué sous Système de Management de la Qualité certifié AFAQ ISO 9001.

05/2021 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

Date de publication : Avril 2022. Version 1.