

Venoped by Sigvaris - Informations d'utilisation



SIGVARIS - Z.I. Sud d'Andrézieux - Rue B. Thimonnier BP 60223 - 42173 St-Rambert Cedex France

Les semelles Venoped aident à activer le retour veineux* lorsque vous marchez (travail, voyages, loisirs) et participent à soulager vos jambes.

*Seiter H et al. Evaluation d'une nouvelle semelle veineuse. Angéiologie 2001 ; Vol. 53, n°3, pp. 117 à 120.

Indications : contribue à activer le retour veineux à la marche pour soulager les jambes fatiguées.

Contre-indications : intolérance aux matières utilisées.

Précautions d'emploi : insérez dans la chaussure, zones de reliefs vers le haut. Ne pas découper. Ne pas utiliser sur une peau lésée. Doit être porté avec des chaussettes et dans des chaussures adaptées. En cas de douleur ou d'inconfort, retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Ne peut se substituer à un produit de compression médicale ni à des semelles orthopédiques. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Recommandations : retirez toute semelle déjà présente dans la chaussure. Pas de séchage proche d'une source de chaleur. Renouvelez le produit dès les premiers signes d'usure ou après 6 mois d'utilisation quotidienne. Conservez dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Conseils d'entretien :

1185



Composition :

Modèle Classic : 91% polyuréthane, 9% polyester

Modèle Eté : 92% polyuréthane, 8% polyester

Modèle Hiver : 60% polyuréthane, 37% polyester, 3% aluminium

 Les produits Venoped by Sigvaris sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ces dispositifs sont des produits de santé qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Demandez conseil à votre pharmacien.

Décembre 2020 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. Date de publication : Décembre 2020.

Date de publication : Avril 2022. Version 1.