

Rolly



www.sigvaris.com

Rolly est un accessoire de dispositif médical de classe de risque 1 (règlement 2017/745) fabriqué par SIGVARIS.

Sigvaris, SIGVARIS GROUP and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St.Gallen / Switzerland, in many countries worldwide.
© Copyright 2022, by SIGVARIS St-Just St-Rambert, France.



 SIGVARIS
ZI Sud d'Andrézieux - Rue B. Thimonnier 42170 St-Just St-Rambert France
UKRP: SIGVARIS BRITAIN LTD, 1 Imperial Court, Magellan Close, Andover SP10 5NT

100222 - Date de publication : 10/2022 - Version 3 -  day on mens



- *Félicitations pour l'achat de Rolly. Afin de profiter pleinement de tous les avantages de ce dispositif d'aide à l'enfilage et au retrait des bas médicaux de compression, lisez attentivement la notice avant utilisation.*
- *Congratulations on the purchase of your Rolly application aid. In order to get the most out of your unique donning and doffing device, please read this leaflet carefully.*
- *¡Felicidades! Acaba de adquirir el ponemedias Rolly. Para una utilización óptima del ponemedias, lea atentamente las instrucciones.*
- *Parabéns pela aquisição do seu dispositivo Rolly. Para otimizar o seu dispositivo para calçar e descalçar, por favor, leia atentamente este folheto.*
- *Σας συγχαίρουμε για την αγορά του ενισχυτικού βοηθήματος Rolly. Για να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μοναδική προσθετική-αποσπώμενη συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο.*



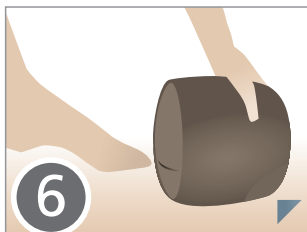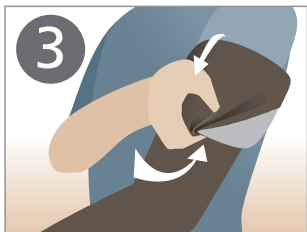

- 1 Enfilez le produit à l'endroit sur le bras et bien l'étirer pour éviter les plis.
- 2 Positionnez Rolly sur le bras jusqu'en haut du produit en le faisant rouler.
- 3 Attrapez le bout du produit et faites le passer par dessus Rolly en le tirant jusqu'à la main. Remontez Rolly et glissez le produit à l'intérieur.
- 4 Faites rouler Rolly jusqu'au bout de la main pour enrôler le produit. Enlevez Rolly.
- 5 Terminez d'enrouler le produit jusqu'à sa pointe : celle-ci doit être bien tendue.
- 6 Placez votre pied face à la pointe en veillant à ce que le talon soit positionné en dessous.
- 7 Enfoncez votre pied dans Rolly. Passez le talon et déroulez Rolly.
- 8 Retirez Rolly en le laissant rouler sur lui-même, utilisez sa surface striée pour ajuster la pose et répartir la matière

2

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Rolly

Τα προϊόντα συμπίεσης ενδέχεται μερικές φορές να δυσκολεύετε να τα φορέσετε και να τα αφαιρέσετε, ιδιαίτερα εάν είστε περιορισμένης κινητικότητας ή έχετε δυσκολία με τα χέρια σας. Το Rolly είναι η ιδανική λύση επιτρέποντας στο ένδυμα συμπίεσης να κινείται αβίαστα μέχρι τα άκρα σας. Ενδείκνυται για ενδύματα συμπίεσης κάτω γόνατος ή ριζομηρίου με ανοικτά ή κλειστά δάχτυλα. Σε αντίθεση με πολλά πρόσθετα-αποσπώμενα βοηθήματα, το Rolly είναι επίσης καταπληκτικό για την εύκολη αφαίρεση της κάλτσας συμπίεσης.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Εγνώσθενες αλλεργίες στα συστατικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αφαιρέστε αν μπορείτε οποιαδήποτε κοσμήματα, δαχτυλίδια και ρολόγια πριν από τη χρήση του Rolly για να αποφύγετε να τραυματίσετε τις κάλτσες σας.
- Μην τοποθετείτε το Rolly σας σε θερμαντικό σώμα ή σε άμεση επαφή με πηγή θερμότητας. Μην θερμαίνεται με οποιοδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο για την πλύση του Rolly σας.
- Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα στο Rolly σας.
- Αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης του Rolly.
- Αφαιρέστε το Rolly από το πόδι σας μετά τη χρήση.
- Μην το βγάζετε από το κεφάλι σας.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αν το Rolly καταστραφεί
- Μην διστάσετε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για οποιοδήποτε απορίες σας

Αν το Rolly καταστραφεί και σημειωθεί διαρροή νερού, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του και να το αποχωριστείτε οριστικά.

Μολονότι το υγρό δεν είναι τοξικό, αποφύγετε την απεριόριστη επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν το οποίο σχετίζεται με το προϊόν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο γνωστοποίησης προς τον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του Κράτους μέλους όπου κατοικεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Το Rolly καθαρίζεται με σαπούνι και νερό.
- Απολυμαίνεται με ισοπροπυλική αλκοόλη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Donner - Δεν περιέχει λάτεξ : Συμπολυμερές κατά συστάδες Υδρογονωμένο σύμπλεγμα στυρολίου – ισοπρενίου – βουταδιενίου Αντιοξειδωτικό - Αντι-αναστολέας.

Υγρό (σαπουνόνερο) : Πολυακρυλαμίδιο - Ακρυλαμίδιο - Αζίδιο νατρίου - Νερό.

Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης του αρχείου: 10/2022. Έκδοση 3.

11