

# sigvaris

# FIX

**LOTION ADHÉSIVE  
POUR PRODUITS  
DE COMPRESSION  
MÉDICALE**

FIX est une lotion adhésive hydrosoluble spéciale qui permet de bien faire tenir les produits de compression médicale sur les bras et les jambes. FIX est adaptée à un usage quotidien.

L'avis d'un professionnel de santé est nécessaire.

Garder l'emballage ou l'étiquette à disposition. Tenir à l'écart des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation.

Ne pas fumer.

Contient : 2-Phénoxyéthanol.

#### INGRÉDIENTS

Water, PVP, Glycerin, IPA, decylene glycol, caprylyl glycol, Phenylpropanol, Ethylhexylglycerol.

**SIGVARIS  
GROUP**

 **Ultrana GmbH**  
MackstrBe 112  
D-88348 Bad Saulgau  
+49 (0)7581-20007298  
www.ultrana.de  
Distributeur : SIGVARIS  
ZI Sud d'Andrézieux  
Rue B. Thimonnier  
42170 St-Just St-Rambert  
France

60 ml e



FR



LOT

REF




321457



4 011368 073908

## MODE D'EMPLOI

Avant d'appliquer FIX, s'assurer que la peau est propre et sèche, et éliminer tout résidu d'adhésif d'une application antérieure du bras ou de la jambe et du produit de compression. Enfiler le produit médical de compression. Rabattre le bord du produit de compression et appliquer la lotion adhésive avec l'applicateur à bille, sur la peau exposée (pas sur le bas) (A et C). Une seule application de FIX autour du bras ou de la jambe suffit. Remonter ensuite le bord du produit de compression et le presser contre la peau. Dans le cas de produits dotés d'une bordure en silicone, FIX ne doit pas être appliquée directement sous celle-ci. Pour des produits très épais, FIX doit être appliquée sur la peau en deux bandes verticales (B et D).

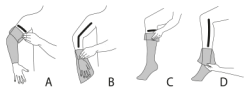

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les résidus de la lotion adhésive peuvent être facilement éliminés de la peau ou des produits de compression par un simple lavage à l'eau. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des produits de nettoyage ou des lingettes désinfectantes supplémentaires.

Tous les jours, après avoir retiré le produit de compression, éliminer tous les résidus d'adhésif du bras ou de la jambe avec de l'eau et laver le produit de compression conformément aux instructions du fabricant de ce dernier. FIX est hydrosoluble, ne contient aucun colorant ni aucun parfum et ne laisse aucune tache.

### Contre-indications :

- Maladies de la peau enflammées ou suintantes (notamment neurodermatite).
- Plaies ouvertes.
- Incompatibilité avec les ingrédients.

### Recommandations :

- Ne pas appliquer sur des zones cutanées soumises à un traitement médical ou cosmétique (patch de nicotine, lotions, produits de maquillage, parfums, crèmes/huiles pour épilation, etc).
- Ne pas appliquer sur des piercings, une peau tatouée ou des conduites de perfusion.
- En cas de lésions, de réactions allergiques ou de malaise, retirer les produits de compression et nettoyer soigneusement la peau avec de l'eau.
- Ne pas utiliser à d'autres fins. Ne pas utiliser comme déodorant.
- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pendant une durée suffisamment longue, les paupières ouvertes et consulter un ophtalmologue.
- Ne pas ingérer la lotion adhésive. En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne pas provoquer de vomissements et consulter un médecin.

### Instructions spéciales

La sueur, les autres liquides, les produits de soins de la peau ou les activités aquatiques peuvent entraîner une perte de résistance de l'adhésif, ce qui peut nécessiter une nouvelle application de FIX. FIX n'est pas conçue pour faire adhérer plusieurs produits de compression les uns aux autres.

### Avertissements et précautions

Toujours maintenir l'applicateur « roll-on » propre lors de son utilisation. Si FIX n'est pas correctement dosée/utilisée, aucune garantie ne peut être fournie pour des résultats donnés. Les enfants et les personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales doivent être assistés lors de l'utilisation de FIX par le personnel soignant ou des proches. En cas de prise de médicaments susceptible de provoquer une réaction cutanée (glucocorticoïdes, antiallergiques, modulateurs immunitaires topiques, etc.) ou si la peau présente des blessures, des irritations ou fait l'objet de traitements, etc, consulter le médecin traitant avant utilisation. Pour une adhérence optimale, il est recommandé de raser la surface de la peau sur laquelle la lotion adhésive est appliquée avant utilisation. Si la zone contient des poils épais, épiler ou raser la peau afin que le produit adhère bien à la peau. Ne pas appliquer FIX immédiatement après le rasage afin d'éviter toute irritation cutanée et toute sensibilité. Après avoir appliqué FIX, l'utilisateur doit se laver soigneusement les mains avec de l'eau pour éliminer les résidus d'adhésif.

### Conditions de stockage et/ou de manipulation spéciale qui s'applique

Protéger le produit contre les rayons directs du soleil, la chaleur et l'humidité. Nous recommandons la conservation du produit à température ambiante. Le produit doit toujours être hermétiquement fermé, entreposé et transporté en position verticale. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité disponible à l'adresse suivante : [www.ultrana.de](http://www.ultrana.de). En cas d'accident ou de malaise, appelez le numéro d'urgence anti-poison de votre pays. Du fait du vieillissement des substances, les performances de la lotion adhésive ne peuvent être garanties que pendant une période limitée. La date de péremption de la lotion adhésive est indiquée sur le flacon. Ne pas utiliser la lotion adhésive après la date de péremption. Conserver le produit uniquement dans le flacon d'origine fermé. Conserver la lotion adhésive hors de portée des enfants et des personnes souffrant d'un handicap mental. Tout incident grave survenu avec la lotion adhésive doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays d'utilisation.

### Contactez-nous!



Le produit est destiné à un utilisateur unique.

Retrouvez tous nos conseils et toutes nos offres sur [www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)

Sigvaris, SIGVARIS GROUP and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. 2022 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert.